

# Reinigen Nougag Hoekstuk

## Schoonmaakprocedure, na elke operatie



1. Spoel het hoekstuk schoon onder de kraan. Let op: niet in het trilbad!



2. Controleer **na elke operatie** of de kop goed vastzit, door de meegeleverde sleutel te gebruiken.



3. Controleer **na elke operatie** of de hals goed vastzit, door de meegeleverde sleutel te gebruiken.



4. Plaats de spraykop van Nougag Nou-Clean (olie) in de onderkant van het hoekstuk. Spray gedurende 2 seconden.



5. In plaats van handmatig te sprayen, is gebruik van de Assistina aan te raden. Het apparaat reinigt én smeert het hoekstuk inwendig. Nadien het hoekstuk steriliseren, volgens standaard sterilisatie richtlijnen.

## Schoonmaakprocedure, periodiek



1. Draai de hals van het hoekstuk los met de meegeleverde sleutel.



2. Verwijder de kop van het hoekstuk, zodat de as vrij gelegd wordt. Verwijder de as uit het hoekstuk.



3. Draai de kop open met de meegeleverde sleutel.



4. Maak de kop open, zodat het asje vrij gelegd wordt. Verwijder het asje uit de kop.



5. Reinig de losse onderdelen met desinfectiemiddel en borstel ze schoon. Zorg ervoor dat alle onderdelen bij elkaar blijven!




6. Zet het hoekstuk als volgt in elkaar:  
- plaats de kleine as (4) in de kop van het hoekstuk (3)  
- draai het afdekschroefje (5) vast op de kop (3) (**tegen de klok in!**)  
- plaats de lange as (2) terug in de body (1) van het hoekstuk  
- draai de kop (3), over de as (2) vast aan de body (1)

Vervolgens standaard reinigings- en sterilisatieprocedure volgen.

# Reinigen Nouvag Micromotor



1. Spoel de micromotor schoon onder de kraan. Let op: niet in het trilbad!

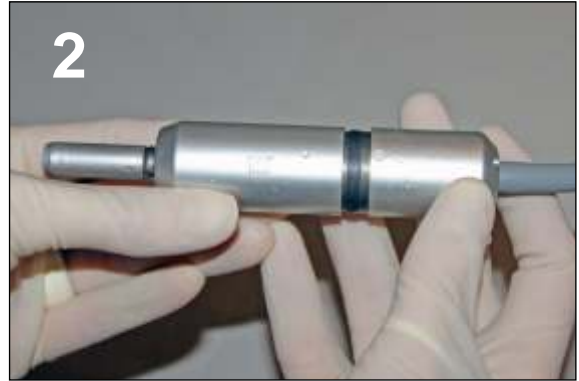

2. Draai het achterste gedeelte van de micromotor los.



3. Maak de 2 gedeeltes los van elkaar, door de 2 delen voorzichtig van elkaar te trekken.



4. Vouw een tissue om het onderste deel.



5. Plaats de spraykop van Nouvag Nou-Clean (olie) in de kop van de micromotor. Spray gedurende 2 seconden.



6. Draai de micromotor weer in elkaar. Wees voorzichtig met de 3 uit stekende pinnetjes! De micromotor steriliseren, volgens standaard sterilisatie richtlijnen.