

## Reiniging Chirurgisch Instrumentarium

### Vorbereiding

Verzamel na de operatie al het gebruikte instrumentarium.

Spoel het instrumentarium goed af met **koud** water, verwijder zichtbaar vuil met zachte borstel of doek



### Inrichting

Leg al het instrumentarium (zoveel mogelijk open en niet tegen elkaar) terug in de tray.

Sluit de tray goed en plaats deze in de thermodesinfector.



### Steriliseren

Vervolgens standaard sterilisatie-procedure volgen.