

Nouvag hoekstuk NH32P en handstuk NH1

Vorbereiding

- verwijder de boor uit de kop en eventuele accessoires aan het hoekstuk/handstuk
- spoel het hoekstuk/handstuk af met koud water. Niet in het trilbad!
- zichtbare viezigheid op de buitenkant met een alcoholdoekje schoonmaken
- hoekstuk/handstuk niet nat neerleggen maar gereedmaken voor reiniging:
 - o plaats het hoekstuk/handstuk in de automatische hoekstukreiniger (DAC)
 - o of plaats deze rechtop in de thermodesinfector



Oliën van het hoekstuk/handstuk

- plaats de spraykop in de onderkant van het hoekstuk/handstuk
- vouw een tissue om het hoekstuk en spray gedurende 2 seconden (bijv. met NouvaOil ref.2128)
- veeg overtollige olie af met een doek
- in plaats van handmatig sprayen, is het ook mogelijk de Assistina te gebruiken. Dit apparaat reinigt en smeert het hoekstuk inwendig

Steriliseren van het hoekstuk/handstuk

- controleer of de hals goed vastzit, door de meegeleverde sleutel te gebruiken
- plaats het hoekstuk DROOG in de autoclaaf (zak of container)
- controleer of hoekstuk/handstuk droog uit autoclaaf komt. Niet nat opbergen!

