

Nouvag micromotor MM2097

Micromotor behorend bij chirurgische machine MD11 en MD30

De micromotor moet na ieder gebruik altijd geolied worden, alvorens te steriliseren. Oliën van de micromotor behoort tot het standaard onderhoud. Door dit uit te voeren voorkom je warmlopen en doorbranden!


Vorbereiden oliën van de micromotor

- zichtbaar viezigheid op de buitenkant met een alcoholdoekje schoonmaken
- schroef de motorkap los en verwijder de kabel
- schroef de hoekstukdrager los



Oliën van de micromotor

- schroef de micromotor op de spraykop (de spraykop wordt standaard bij een MD motor geleverd)
- vouw een tissue om de motor
- spray de micromotor gedurende 3 seconden (bijv. met NouvaOil ref.2128) en veeg de overtollige olie weg
- schroef de kabel en de hoekstukdrager weer vast

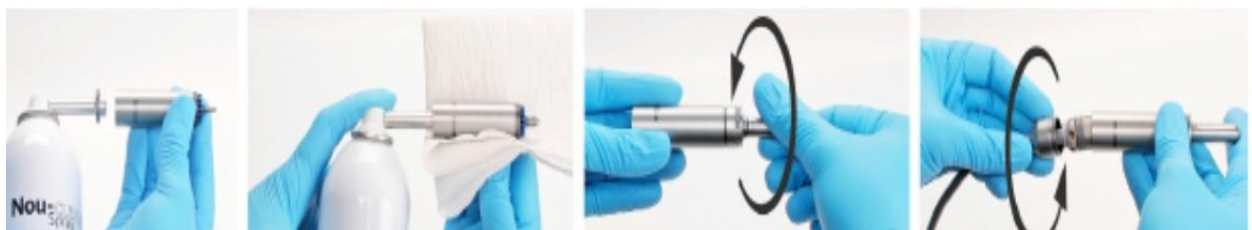

De micromotor kan nu gesteriliseerd worden volgens standaard sterilisatie procedure in de autoclaaf. **Let op: niet in desinfectator, niet in trilbad.**

Om kabelbreuk te voorkomen, zorg ervoor dat het snoer niet geknikt opgerold wordt.