

Inpakken Sterilisatie Container met clip systeem



Zet de afgesloten tray met instrumentarium onderin de container.




Plaats de afgesloten chirurgische tray er bovenop.




Plaats de micromotor naast de chirurgische tray en draai het snoer om de tray.



Leg 2 groene doeken bovenop de tray.

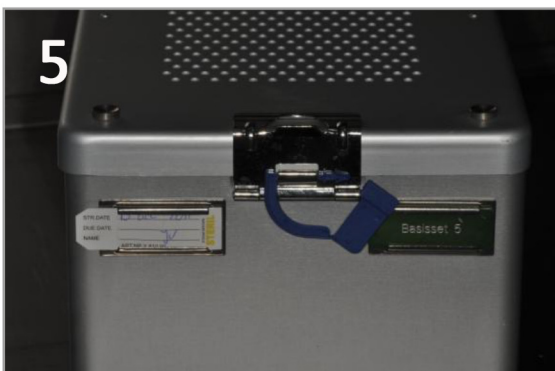

Sluit de container. Plaats de teststrip, voorzien van datum en paraaf. Plaats de zegel en sluit deze.

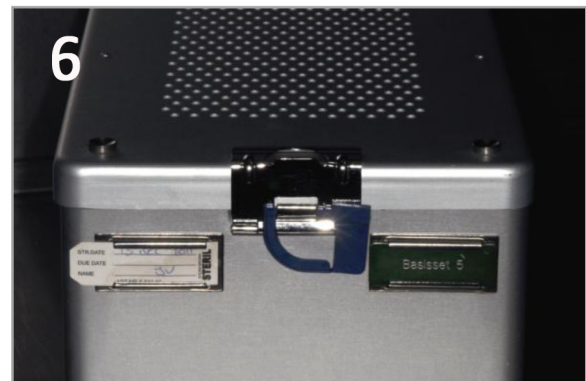

De teststrip verkleurt paars, als teken dat de juiste sterilisatietemperatuur van 134°C is bereikt.