



# Chirurgische Machine MD30

# NOUVAG<sup>+</sup>

## MD30

De chirurgische machine MD30 bestaat uit:

- Chirurgische motor
- Voetpedaal
- Micromotor (voor aansluiting hoekstuk)

De MD30 biedt de mogelijkheid voor het aansluiten van 2 micromotoren. Standaard wordt er één micromotor meegeleverd. Een extra micromotor (MM2097) is separaat bij te bestellen.



### Contactpunten

Op de voorzijde (rechts) van de machine bevinden zich 2 contactpunten. Deze zijn bestemd voor de voor de micromotor. De micromotor moet bevestigd worden in het contactpunt waar het lampje brandt. Het contactpunt aan de achterkant is bestemd voor het voetpedaal.



### Voetpedaal

De verklaring voor de knoppen op het voetpedaal:

- Blauwe knop (druppel) > watertoevoer
- Groene knop (P) > programmakeuze
- Gele knop (M) > rechtsom / linksom draaien micromotor

### Programma instellingen

Stel de chirurgische machine MD30 vóór gebruik in, via de knoppen op de machine. De instelling blijft in het geheugen van de machine staan en wordt weergegeven in de display.

Programma 1	Hoekstuk 32:1	55Ncm	1.000 speed Rpm	Pomp 100% aan	Preparatie
Programma 2	Hoekstuk 32:1	55Ncm	40 speed Rpm	Pomp 100% uit	Inbrengen implantaat
Programma 3	Handstuk 1:1	6Ncm	40.000 speed Rpm	Pomp 100% aan	Botkam afvlakken

Instellingen kunnen naar eigen keuze, aangepast worden.

Voor uitgebreide informatie over de chirurgische machine en reiniging van de onderdelen, zie de handleiding.



1  
Maak de omverpakking van de fysiologische zoutoplossing open, vóórdat je steriele handschoenen aantrekt.



2  
Laat de binnenzak met de fysiologische zoutoplossing op het steriele blad vallen.




3  
Maak de omverpakking van het infusiebestek open, vóórdat je steriele handschoenen aantrekt.



4  
Laat de binnenzak met het infusiebestek op het steriele werkblad vallen.



5  
Open de verpakking van het infusiebestek en laat het infusiebestek op het steriele werkblad vallen.

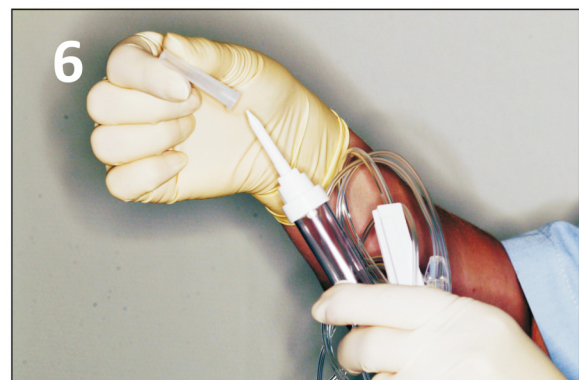

6  
Trek nu de steriele handschoenen aan. Verwijder de dop van het infusiebestek.





Open de toevoer naar de fysiologische zoutoplossing door het blauwe dopje om te klikken (te breken).



Druk de plastic pin van het infusiebestek in de blauwe dop van de zoutoplossing, tot het opstaande ranje op de pin (zie pijl).



Hang de fysiologische zoutoplossing aan de standaard, met de tekst naar voren.



Druk op de grijze knop aan de schuine voorkant van de machine om de pompunit te openen.



Plaats de slang van het infusiebestek met de verdikking in de pompunit van de machine.

Let op de pijl van de watergeleider, deze geeft de richting van de slang aan (van achteren naar voren).

