

Together, let's do more

First choice

Digitale afdruk, welke info geef ik extra door aan het lab?

Stelling


Een digitale afdruk met de GenTek™ orale scanbodies of Encode™ healing transfer abutments voor de Tapered Screw-Vent™ of de Eztetic™ implantaten is snel, handig en comfortabel voor de patiënt. Soms gaat er toch wat fout.

GenTek™ orale scanbodies



- Scanbodies zijn verkrijgbaar in 2 hoogtes (H4 en H7)
- Posterior → H4 mm
- Anterior → H7 mm


Encode™ healing transfer abutment

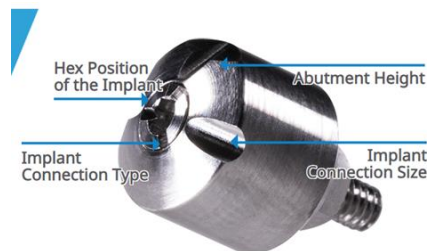

- Encode™ healing transfer zijn verkrijgbaar in 3 hoogtes (H3, H5 en H7)
- Verschillende Emergence profiles (breedte)

Informatie voor het laboratorium

- Afdruk gemaakt met de GenTek™, hoogte scanbody (H4 of H7)
- Afdruk gemaakt met de Encode™, modeltype door (hoogte en emergence profile)
- Type implantaat
- Diameter implantaat

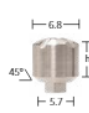

Collar Height	3.5 mm (D)		4.5 mm (D)			5.7 mm (D)
	3.8 mm (EP)	5.0 mm (EP)	5.0 mm (EP)	5.6 mm (EP)	6.0 mm (EP)	6.8 mm (EP)
3 mm	TEHA3383	TEHA3503	TEHA4503	TEHA4563	TEHA4603	TEHA5683
5 mm	TEHA3385	TEHA3505	TEHA4505	TEHA4565	TEHA4605	TEHA5685
7 mm	TEHA3387	--	--	TEHA4567	--	--