

Herken het type Encode Emergence Healing Abutment

Hex Orientation - De rechte lijn op het Encode Emergence Healing Abutment geeft de interne hex aan.

Implant Connection - Het aantal groeven op het Encode Emergence Healing Abutment identificeert het type implantaat systeem. (TSX, TSV of EZT)

Implant Diameter - Het aantal dimples onder de rechte lijn van het Encode Emergence Healing Abutment geeft de diameter van het prothetische platform aan.

Abutment Height - Het aantal dimples aan de rechterzijde geeft de hoogte van het Encode Emergence Healing Abutment aan.

