

Help het implantaat moet verwijderd worden, wat nu?

Stelling

Voor het verwijderen van een implantaat kunnen diverse redenen zijn. Soms kan het implantaat eenvoudig met een instrument eruit gedraaid worden, soms kost het wat meer moeite.

Moeizaam verwijderen van het implantaat



- Gebruik hiervoor een Implantaat Removal Tool IRT of de Kexim Rescue Kit
- Maak de "implantaat" alveole grondig schoon
- Vul het ontstane defect met Puros Cancellous Allograft materiaal, zodat na circa 10 weken tot herimplantatie overgegaan kan worden.

Waarschuwing

Als het implantaat niet kan worden verwijderd, zonder bovenmatig veel kracht, is de trepaanboor een oplossing. De inwendige diameter van de trepaanboor is hiervoor bepalend.

Welke codes kan je declareren?

Explantaties binnen 6 maanden na plaatsen, mogen niet gedeclareerd worden.

- J26 Moeizaam verwijderen van implantaat
Mucoperiostale opklap, inclusief hechten en wondtoilet.
- J36 Eenvoudig verwijderen van implantaat
Inclusief hechten en wondtoilet.
- J12 Kaakverbreding en/of verhoging
- Techniekkosten, Puros Allograft materiaal en eventueel een membraan of PRF techniek

Kan je het verloren gegane implantaat claimen?

Ja, dit kan in veel gevallen wel. Stuur binnen 14 dagen na de explantatie het implantaat, gesteriliseerd (in een laminaat zakje) met een volledig ingevuld garantie formulier naar ons op.

Waar kan je het garantieformulier vinden?

Op onze website www.implacom.nl/service/garantie

Meer tips voor het verwijderen van een verloren gegaan implantaat

Op onze website kunt u bij Tips & Tricks meer informatie hierover vinden.

www.implacom.nl/voor-u-gelezen/blog-implantaten