



Together let's do more



## Plaatsen van een healing collar

De titanium healing collar, is ééndelig en wordt gebruikt voor de vorming van de weke delen tijdens het genezingsproces, vóórdat er een definitieve restauratie wordt geplaatst. De healing collar is uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik.

### HERKENNING/KLEURCODERING



3,5 ø platform






4,5 ø platform



5,7 ø platform





| Kleur   | Diameter implantaatplatform (links) | Diameter EPC contour (rechtsboven) | Hoogte (rechtsonder) |       |       |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------|
|   |                                     |                                    | 3 mm                 | 5 mm  | 7 mm  |
|   | 3,5 mm                              | 3,5 mm (geen verbreding)           | HC333                | HC335 | -     |
|   |                                     | 4,5 mm                             | HC343                | HC345 | HC347 |
|   |                                     | 5,5 mm                             | HC353                | HC355 | -     |
|   | 4,5 mm                              | 4,5 mm (geen verbreding)           | HC443                | HC445 | HC447 |
|   |                                     | 5,5 mm                             | HC453                | HC455 | HC457 |
|   |                                     | 6,5 mm                             | HC463                | HC465 | -     |
|  | 5,7 mm                              | 6,5 mm                             | HC563                | HC565 | -     |

### PLAATSEN HEALING COLLAR – VOORKOM BESCHADIGING INTERN SCHROEFDRAAD VAN HET IMPLANTAAT

Plaats de healing collar met behulp van een 1.25 mm hextool (zeskantsleutel) in het implantaat en zorg er voor dat de healing collar en de hextool **axiaal** (in het verlengde van de as van het implantaat) staan, zodat het schroefdraad van de healing collar zonder weerstand (wrikken) in het interne schroefdraad van het implantaat geschroefd kan worden. **Maximale kracht 10Ncm (is handvast).**

#### TIP

Om de inzetrichting van het geplaatste implantaat eenvoudig te kunnen bepalen, is het handig om vóóraf de 1.25mm hextool in het implantaat te plaatsen. Hiermee wordt de inzetrichting van het implantaat direct zichtbaar

#### OPM

Ervaart u enige weerstand bij het indraaien van de healing collar, dan betekent dit dat de healing collar niet in het verlengde van de as van het implantaat geplaatst is. Draai de healing collar er dan weer uit en draai hem er in de juiste stand weer in. Indien gewenst kan een röntgenfoto (solo) worden gemaakt om te controleren of de healing collar volledig op zijn plaats zit.