



Tapered Screw-Vent® implantaten diameter en platform

vanaf 1990 - heden


3.5mmD Platform

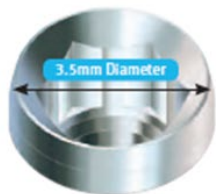


4.5mmD Platform

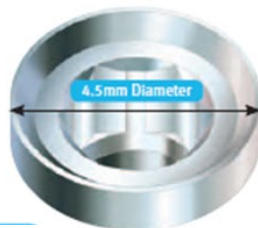


5.7mmD Platform

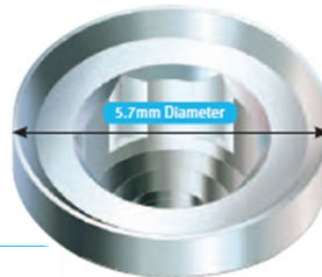


groen

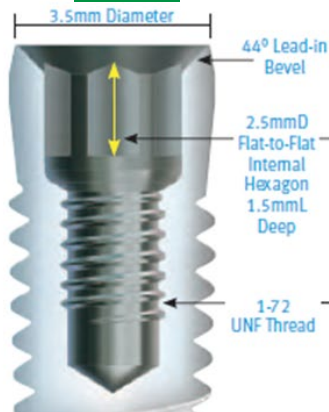

paars

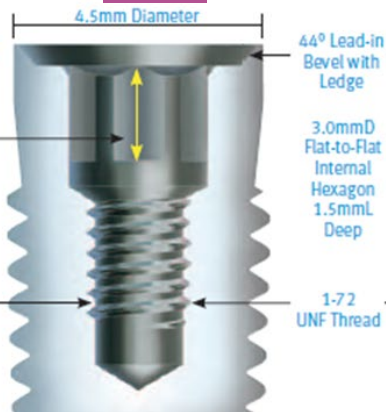

goud

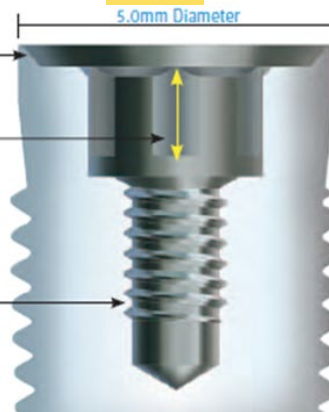

OPM

Voor 1990 was de Screw-Vent® voorzien van een **2mm** interne hexagon.

TIP

Indien je twijfelt over de maat van de hex, kan je deze m.b.v. een fixturemount bepalen.

Geen gebruikte/reserve fixturemount op voorraad? We sturen ze gratis mee met de order.



NB

De groene fixturemount past **niet** in een 2mm hex.

Neem in dit geval met het **Implacom Team** contact op.


Wij adviseren je graag.

*)TSI abutments voor een steg of drukknop

1990 - 1997



*)TSI

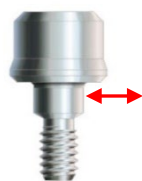

*)TSIW

Eëndelig abutment,
vlakke kop met interne
hex 1.77mm

TSI = 3.5 platform
TSIW = 4.5 platform



*)TS1



*)TS1W

Eëndelig abutment,
tapse kop met interne
hex 1.77mm

TSI1 = 3.5 platform
TS1W = 4.5 platform



HX1.77
hextool

*)TSI abutments met goud gegoten steg



*)BTO(1)
replica



*)TST
afdrukstift
(gesloten
lepel)



PSO(1)
uitbrand-
bare kap



TSF
fixatie
schroef



HX1.25
hextool

*)TSI abutments met drukknop

Drukknop diameter = 2.5mm
met interne hex 1.25mm



*)TSB
drukknop



CAH
metalen
housing



CAN
nylon
retentiekap

*)niet meer leverbaar

*)TSI abutments voor een steg of drukknop

1990 - 1997



*)TSI




*)TSIW

Eéndelig abutment,
vlakke kop met interne
hex 1.77mm

TSI = 3.5 platform
TSIW = 4.5 platform



*)TS1

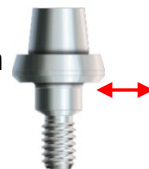

*)TS1W

Eéndelig abutment,
tapse kop met interne
hex 1.77mm

TS11 = 3.5 platform
TS1W = 4.5 platform



HX1.77
hextool

*)TSI abutments met goud gegoten steg en goud aangietbare kap



*)BTO(1)
replica



*)TST
afdrukstift
(gesloten
lepel)



*)GPS(1)
goud
aangietbare
kap



*)TS
fixatie
schroef





HX1.25
hextool

*)niet meer leverbaar



*)ACT tweedelige abutments voor steg 1997 - 1999

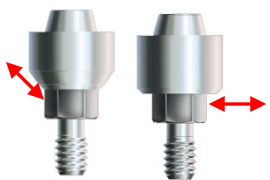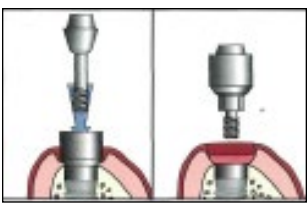


 Tweedelig tapered abutment met interne hex 1.25 mm ACT = Platform 3.5mm ACTW = Platform 4.5mm *)ACT *)ACTW		 HXGR1.25 hextool
---	--	---

Bestaande uit een collar en een schroef  Hoogte 3, 4 of 6mm Collar ACT3S ACT4S ACT6S	Stegposten  *)ACTGC *)ACTP *)TGC SCTS aangiet baar uitbrand baar goudkap kap fixatie schroef
De hex van de collar vormt een koudlas met de interne hex van het implantaat. De collar kan verwijderd worden m.b.v. een poulietrekker TLRT	TLRT poulietrekker 

*)niet meer leverbaar




*)ACB tweedelige drukknop abutments 1997 - 1999

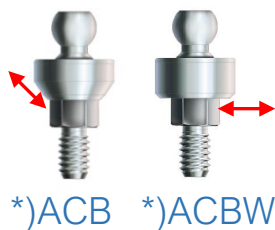


Tweedelig drukknop
abutment met interne hex
1.25 mm

ACB = Platform 3.5mm
ACBW = Platform 4.5mm

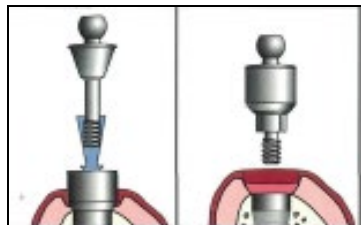

HXGR1.25
hextool

Bestaande uit een collar en drukknopschroef

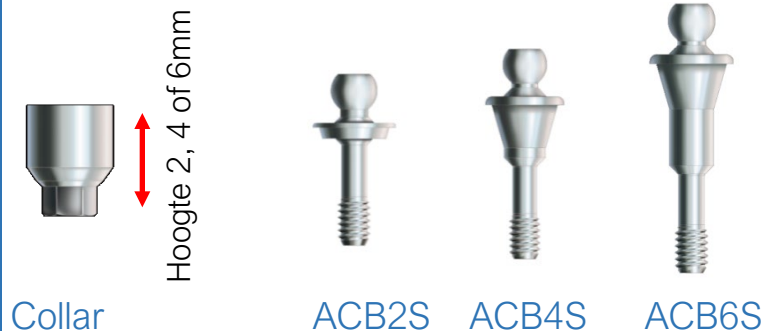

Collar

ACB2S

ACB4S

ACB6S

Matrix

Drukknop diameter = 2.5mm
met interne hex 1.25mm



CAH
metalen
housing



CAN
nylon
retentiekap

De hex van de collar vormt een koudlas met
de interne hex van het implantaat.
De collar kan verwijderd worden m.b.v. een
poulietrekker TLRT


TLRT poulietrekker



*)niet meer leverbaar



TAC eendelig abutment voor een steg 2000 - heden

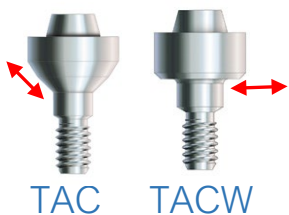

Eéndelig tapered
abutment met interne hex 1.25mm

TAC = Platform 3.5mm
TACW = Platform 4.5mm



HXGR1.25

hextool

Stegposten



ACTGC

aangiet
baar

ACTP

uitbrand
baar

TGC

goudkap
kap

SCTS

fixatie
schroef

Fixatieschroef

Met interne hex 1.25mm



SCTS



Eéndelig tapered tibase met hex
met interne hex 1.25mm
engaged

Hoogte 4.7mm, in te korten tot 4.0mm

ZFX11-ZB-TSV



HXGR1.25

hextool



Eéndelig tapered tibase zonder hex
met interne hex 1.25mm
non engaged

Hoogte 4.7mm, in te korten tot 4.0mm

ZFX11-ZB-TSV

Fixatieschroef



ZFX09-ZB-TSV-RS

Met interne hex 1.25mm



HXGR1.25

hextool



Eéndelig tapered tibase met hex
Schuin schroefkanaal met hexalobular
schroef

Hoogte 7.0, 5.7 of 4.5mm, zelf in te korten.

ZFX11-ZB-TSVA

Fixatieschroef



ZFX09-ZB-TSV-HLRS

Hexalobular interne kop




ZFX02HLD21/28/35

Hexalobular driver



BAC eendelig drukknop abutment 2000 - heden

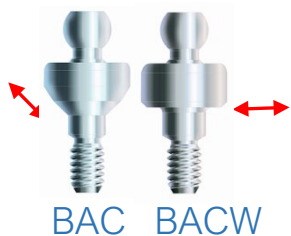

Eéndelig drukknop
abutment met interne hex 1.25mm

BAC = Platform 3.5mm

BACW = Platform 4.5mm



HXGR1.25

hextool

Matrix

Drukknop diameter = 2.5mm
met interne hex 1.25mm



CAH

metalen
housing




CAN

nylon
retentie kap


Kenmerken

Afmeting drukknop 2.5mm
Met interne hex 1.25mm

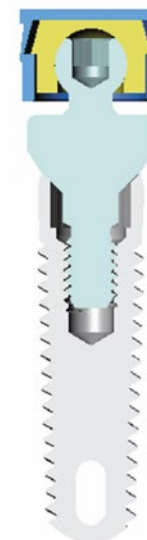



*AdVent eendelig (tissue level) implantaat 2000 - 2018

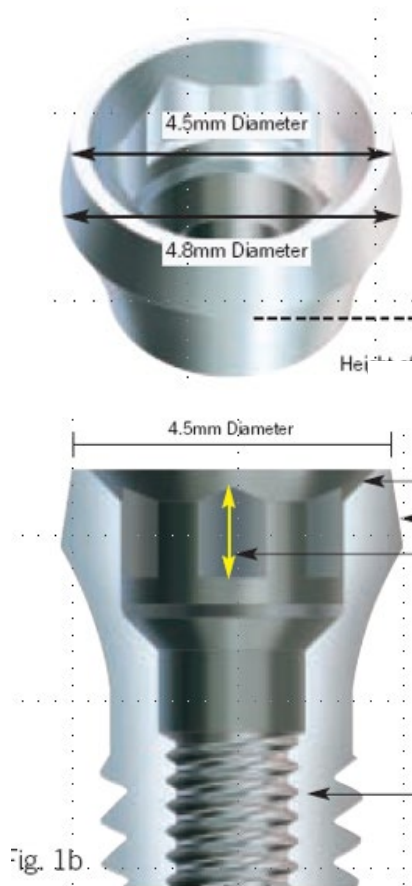

Kenmerken AVB/AVWB Advent implantaat

Eénfase (tissue level) implantaat

4.5mmD platform

3.0mmD interne hex

Diameter 3.7mm, 4.7mm

AV6B Advent implantaat

5.7mmD platform

Diameter 4.7mm

*)niet meer leverbaar

*)AdVent eendelig (tissue level) implantaat 2000 - 2018



Eéndelig tapered
abutment met interne hex
1.25mm

AVACT = geen extra hoogte
AVACT3 = 3mm hoog

*)AVACT *)AVACT3



Eéndelig drukknop
abutment met interne hex
1.25mm

AVBA = geen extra hoogte

AVBA



HXGR1.25
hextool

Stegposten



ACTGC

aangiet
baar

ACTP

uitbrand
baar

TGC

goudkap
kap

SCTS

fixatie
schroef

Matrix

Drukknop diameter = 2.5mm
met interne hex 1.25mm



CAH

metalen
housing





CAN

nylon
retentiekap

*)niet meer leverbaar



Tapered SwissPlus eendelig (tissue level) implantaat

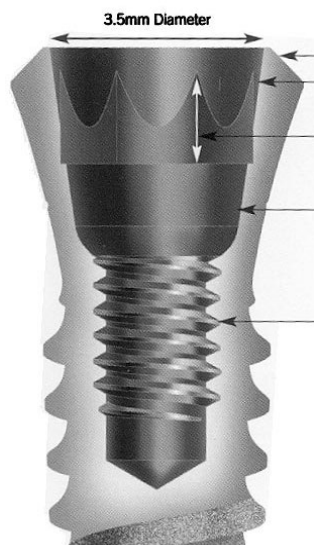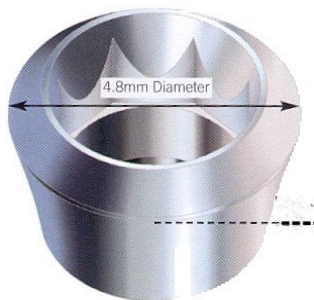

Kenmerken SPB/SPWB Tapered SwissPlus implantaat

Eénfase (tissue level) implantaat

Regular Neck 4.1mmD

4.8mmD platform

3.0mmD interne octagon

Diameter 3.7mm, 4.7mm



Tapered SwissPlus eendelig (tissue level) implantaat

2000 - heden



Eéndelig tapered
abutment met interne hex
1.25mm

OPACT = 1.6mm hoog
OPACT3 = 3.0mm hoog

OPACT OPACT3



Eéndelig drukknop
abutment met interne hex
1.25mm

OPBA = 1.6mm hoog
OPBA3 = 3.0mm hoog

OPBA OPBA3



HXGR1.25

hextool

Stegposten



ACTGC

aangiet
baar

ACTP

uitbrand
baar

TGC

goudkap
kap

SCTS

fixatie
schroef

Matrix

Drukknop diameter = 2.5mm
met interne hex 1.25mm



CAH

metalen
housing




CAN

nylon
retentiekap



Tapered SwissPlus eendelig (tissue level) implantaat

2000 - heden

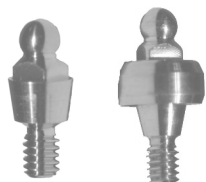

Leverbaar tot 2020

*)OPBD *)OPBD3

Inbrengtool:
vierkantsleutel



Leverbaar vanaf 2020

DB05002446, hoogte 1mm

Accessoires



Inbrengtool, [DB07000266](#)



Torque Wrench Handle Adapter [DB07000268](#)



Torque Wrench [DB07000269](#)




*)niet meer leverbaar



*)Locator Abutments

tot 2022

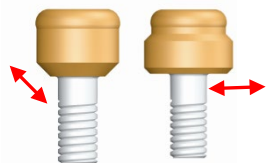

Screw Vent

TLOC3 = 3.5mm platform
TLOC4 = 4.5mm platform
TLOC5 = 5.7mm platform

*)TLOC



SwissPlus

OPLOC = 4.8mm platform

*)OPLOC




AdVent

AVLOC = 4.5mm platform,

*)AVLOC

Matrix

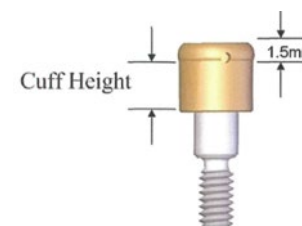

*)niet meer leverbaar



OverdenSURE® Abutments

vanaf 2022



ODS


Screw-Vent

ODS-TSV3 = 3.5mm platform
ODS-TSV4 = 4.5mm platform
ODS-TSV5 = 5.7mm platform


Leverbaar in 6 lengtes

AdVent en SwissPlus

OverdenSure® **niet leverbaar** voor AdVent en SwissPlus

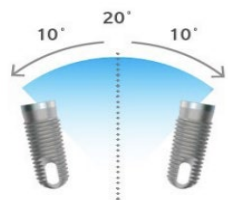

- Extra Light (1.5lbs / 680g)
- Light (3.0lbs / 1360g)
- Medium (5.0lbs / 2270g)

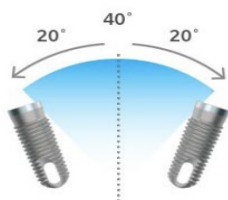

- Extra Light (1.0lbs / 450g)
- Light (2.0lbs / 910g)
- Medium (5.0lbs / 2270g)



ODS-DRVR

SIScator*) abutments voor SwissPlus



SIS-0621

SIScator abutment
Leverbaar in de hoogtes 1 t/m 6 mm



SIS-9113

SIScator inbrengtool voor ratel



SIS-9134

SIScator inbrengtool hoekstuk

*) SIScators – Smart Implant Solutions