

Tapered Tissue Level AV6B AdVent™


Kenmerken:

- 3.9mm apex
- 4.7mm body
- 6.0mm diameter
- 5.7mm platform
- 3.0mm interne hexagon – supra gingivaal, abutmentconnectie met een koudlas

Chirurgie

De kaak in de zijdelingse delen is vaak te smal voor een 6.0mm diameter implantaat terwijl een 5.7mm platform/emergency profile in de molaarstreek gewenst is. De Tapered 6.0 mm Advent™ biedt deze mogelijkheid. Met de 3.9mm apex en de 4.7mm body is er rondom het implantaat voldoende bot aanwezig voor de osseointegratie van het implantaat. De prothetiek maakt gebruik van het brede 5.7mm platform, zonder kaakverbreding/splitting.

De microgap ligt met dit één fase tissue level AdVent™ implantaat boven de mucosa in tegenstelling tot het twee fase bone level Tapered ScrewVent® implantaat. Voor de patiënt aantrekkelijk, een één fase techniek en eenvoudiger schoon te houden.

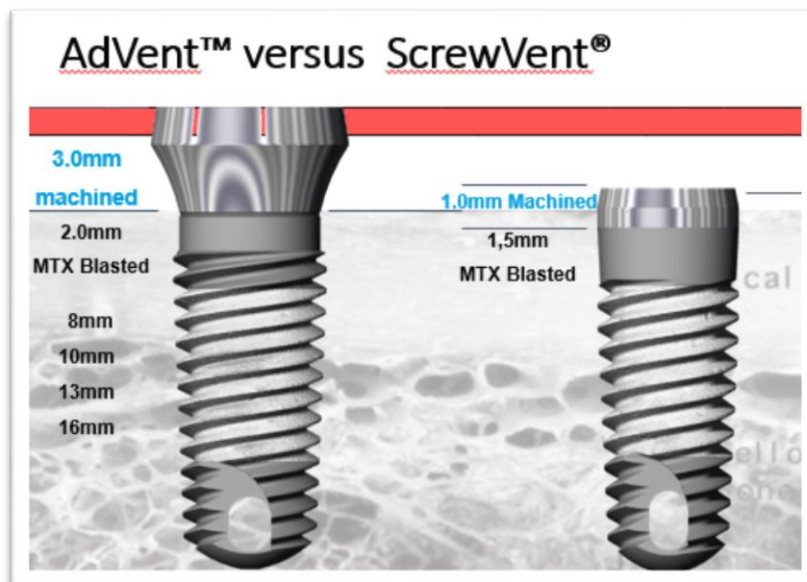

Het chirurgisch protocol en het instrumentarium is gelijk aan de Tapered ScrewVent®, dus de bekende blauwe vertrouwde TSVKIT wordt hiervoor gebruikt. Voor het implantologie team verandert er niets, er hoeft geen (ander) extra instrumentarium gepakt te worden.

Prothetiek – verschroefde kroon op een AV6B AdVent™



De outline van de kroon ligt op de buitenbevel van de Tapered AdVent™. Beslijp het HLA5/6 stock hex-lock abutment recht, zodat de kroon over de bevel kan eindigen. Modificeer het abutment met een hard metalen frees, slijp met een molensteen het overtollige materiaal weg en werk met een papierschijf het abutment af. Gebruik voor het afbakenen van de randen een diamant boor. Behoud of herdefinieer een vlak oppervlak op het abutment als antirotatie voorziening van de kroonkap.

TIP Gebruik een extra AV6R implantaat analog.

Plaats het individuele ontworpen abutment terug in het gipsmodel, scan deze in en ontwerp een monolytische kroon. Verlijm deze met panavia.

