





HEALING COLLAR BIJ TRABECULAR METAL EN TAPERED SCREW-VENT IMPLANTATEN

De titanium Healing Collar, is ééndelig en wordt gebruikt voor de vorming van de weke delen tijdens het genezingsproces, vóórdat er een definitieve restauratie wordt geplaatst. De Healing Collar is uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik.

HERKENNING/KLEURCODERING

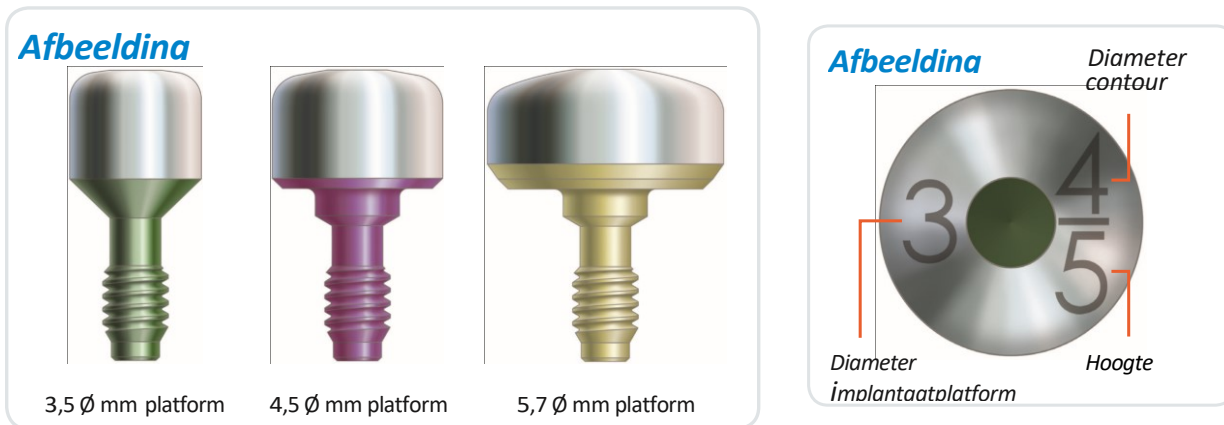

Kleur	Diameter implantaatplatform (links)	Diameter EPC contour (rechtsboven)	Hoogte (rechtsonder)		
			3 mm	5 mm	7 mm
	3,5 mm	3,5 mm (geen verbreding)	HC333	HC335	-
		4,5 mm	HC343	HC345	HC347
		5,5 mm	HC353	HC355	-
	4,5 mm	4,5 mm (geen verbreding)	HC443	HC445	HC447
		5,5 mm	HC453	HC455	HC457
		6,5 mm	HC463	HC465	-
	5,7 mm	6,5 mm	HC563	HC565	-

PLAATSEN HEALING COLLAR – VOORKOM BESCHADIGING INTERN SCHROEFDRAAD VAN HET IMPLANTAAT

Plaats de Healing Collar met een 1.25 mm Hex Tool (zeskantsleutel) in het implantaat en zorg er voor dat de Healing Collar en de Hex Tool zich **AXIAAL** (in het verlengde van de as van het implantaat) bevinden, zodat het schroefdraad van de Healing Collar zonder weerstand (wrikken) in het interne schroefdraad van het implantaat geschroefd kan worden. Maximale kracht 10Ncm (is handvast).

Gebruik geen chirurgische machine bij het plaatsen van de Healing Collar!

Bij implantaten in het achterste deel van de onder- of bovenkaak is het raadzaam een handstuk met een rechte hoek te gebruiken om de Healing Collar er goed in te draaien. Indien gewenst kan een röntgenfoto (solo) worden gemaakt om te controleren of de Healing Collar volledig op zijn plaats zit.

BELANGRIJK: ervaart u enige weerstand bij het indraaien van de Healing Collar, dan betekent dit dat de Healing Collar niet in het verlengde van de as van het implantaat geplaatst is. Draai de Healing Collar er dan weer uit en draai hem er in de juiste stand (axiaal) weer in.